



DERMOMAG

MICROPIGMENTAÇÃO & MICROBLADING

ACQU LHAS

Especificações
Técnicas



✦ AGULHAS

Você sabe que para obter um bom resultado na sua micropigmentação é essencial, além do estudo de pigmentos e da técnica, um equipamento potente para o seu procedimento. Além disso, a escolha da agulha correta e apropriada para cada tipo de técnica, pele e implantação!

Continua conosco que vamos te ajudar a entender melhor sobre as

AGULHAS





DERMOMAG
MICROPIGMENTAÇÃO & MICROBLADING

LEITURA DA AGULHA

Primeiramente, ao utilizar a agulha, é importante saber a leitura dela.

A embalagem da agulha deve conter: ponta, modelo, Registro ANVISA, lote, data de fabricação e indicação de descarte.

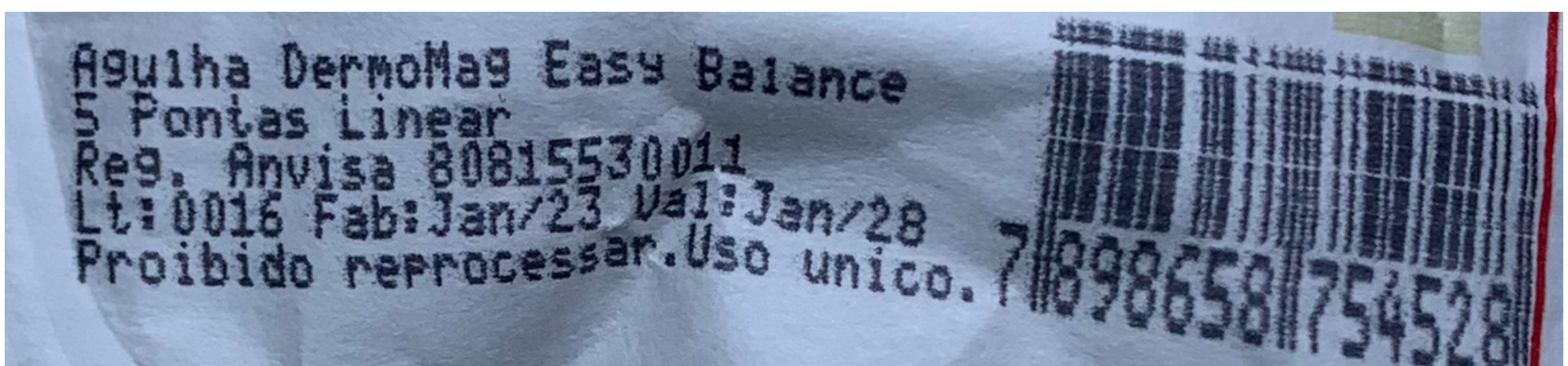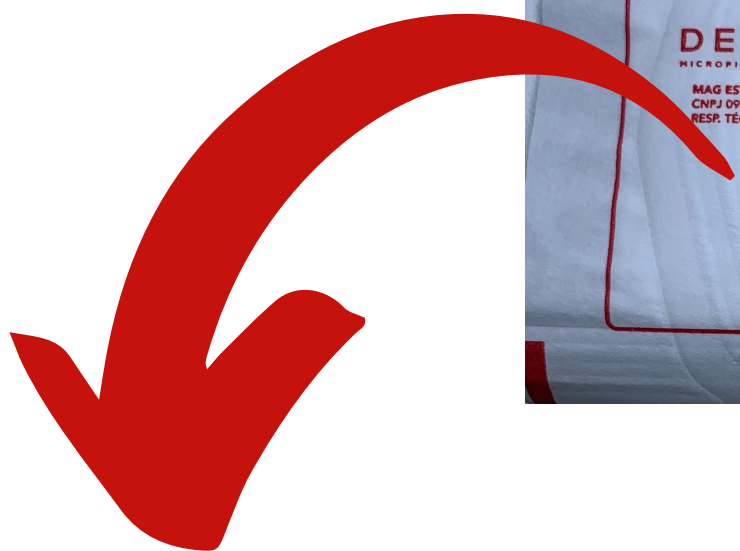

Ponta - 5 pontas
Modelo - Linear
Reg. ANVISA - 80815530011
Lote - 0016
Fab - Jan/23
Val - Jan/28
Indicação de Descarte - Proibido Reprocessar. Uso único.



DERMOMAG
MICROPIGMENTAÇÃO & MICROBLADING

MODELOS DE AGULHA

ROSCA: A agulha DermoMag Rosca é formada por uma haste plástica (polipropileno) com aço inox colado no seu interior. Na base das agulhas Rosca existe uma rosca interna do tubo em todos os dermógrafos DermoMag.



CLICK AQUI



Como montar corretamente seu Dermo Mag Pen



DERMOMAG

MICROPIGMENTAÇÃO & MICROBLADING

MODELOS DE AGULHA

BALANCE: A agulha DermoMag Balance tem utilização exclusiva no dermógrafo DermoMag Easy. O seu corpo externo é em plástico muito resistente com uma ergonomia diferenciada. Possui ponteiros com formato cônico afunilado por onde as hastes de metal encaixam. Contém um sistema de propulsão exclusivo, com 2 elásticos responsáveis pelos movimentos pulsantes da haste, gerando menos ruídos. Ainda contém uma saída de ar na carcaça da agulha, que tem a finalidade de um suspiro, para que o pigmento possa escorrer pela extremidade da haste para adentrar normalmente na pele dos pacientes.



CLICK AQUI



Como montar corretamente seu Dermo Mag Easy




DERMOMAG


MICROPIGMENTAÇÃO & MICROBLADING

MODELOS DE AGULHA

CARTUCHO: O cartucho é uma alternativa moderna que surgiu com o desenvolvimento tecnológico do setor. É um recipiente que contém agulhas acopladas com encaixe para o DermoMag Pen Plus e outros dermógrafos com o encaixe de cartucho universal. Possui uma membrana protetora, para que a tinta não suba e contamine o equipamento.

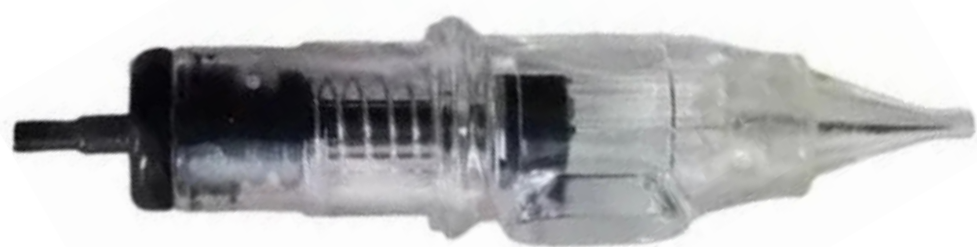

CLICK AQUI

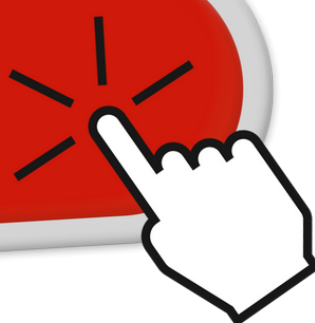


Como montar corretamente seu Dermo Mag Plus



DERMOMAG

MICROPIGMENTAÇÃO & MICROBLADING

ESPESSURA

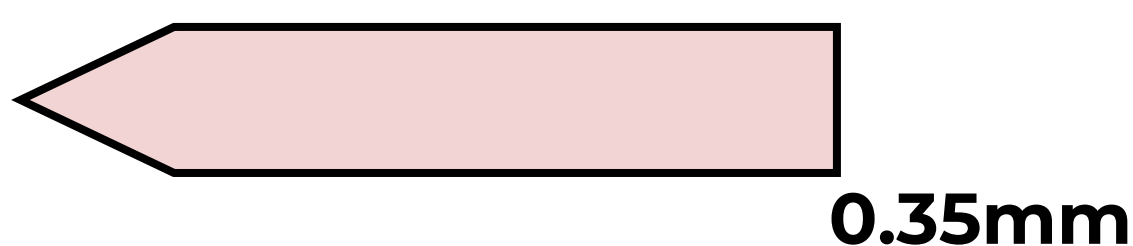

Existem **2 espessuras** básicas disponíveis de **0,25mm – FINE** ou **0,35mm**.

A agulha Fine, 0,25mm, são ideais para traços delicados, esfumados tradicionais suaves e pequenos detalhes em trabalhos avançados, por implantarem pouca quantidade de pigmento.

A agulha mais grossa, 0,35mm, são indicadas para traços mais firmes e aparentes, esfumados tradicionais e preenchimentos mais compactos, uma vez que implantam maior quantidade de pigmento, devido ao maior espaço que atingem na pele.



DERMOMAG
MICROPIGMENTAÇÃO & MICROBLADING

PONTAS



A extensão do afinilamento da ponta determina a forma que a agulha irá penetrar na pele, proporcionando um maior ou menor orifício, que resultará imediatamente a produção do efeito visual na micropigmentação cicatrizada.

PONTA CURTA: Abrem um orifício maior, injetando mais pigmento. São um pouco mais agressivas, mas mantêm uma aplicação mais rápida. Excelente para traços marcados como delineados e lábios, e esfumados leves em tecidos rígidos.


PONTA LONGA: Tipo XLT e Fine, abrem orifícios menores, com um contato mais suave. Utilizadas para composições de pontilhismo e shading, com uma recuperação tecidual mais eficiente nas camadas de pigmento.

PONTA ANGULAR: Tipo Linear e Magnum, com função de cobertura. Utilizada em: indução de ativos, camuflagem, paramédica, etc.




DERMOMAG
MICROPIGMENTAÇÃO & MICROBLADING


MODELOS DE AGULHA

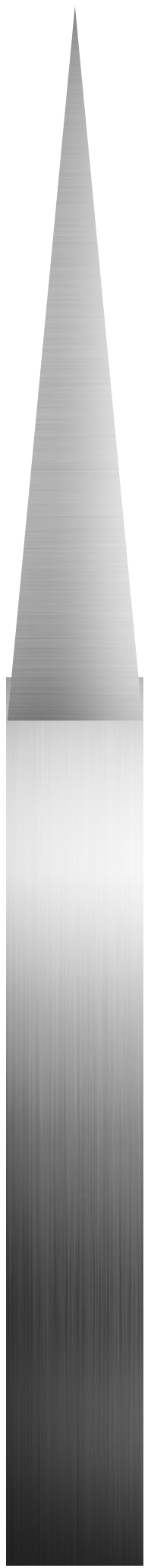

LONGA

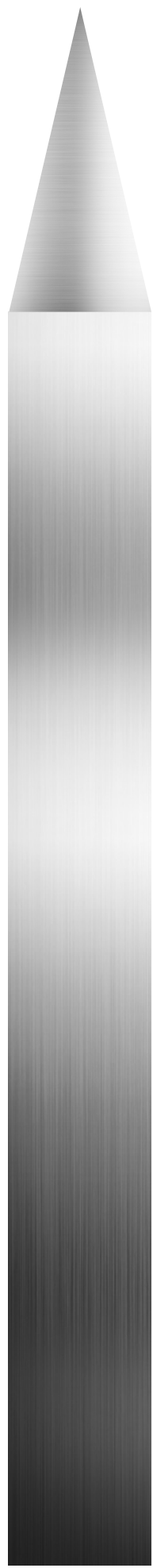

CURTA

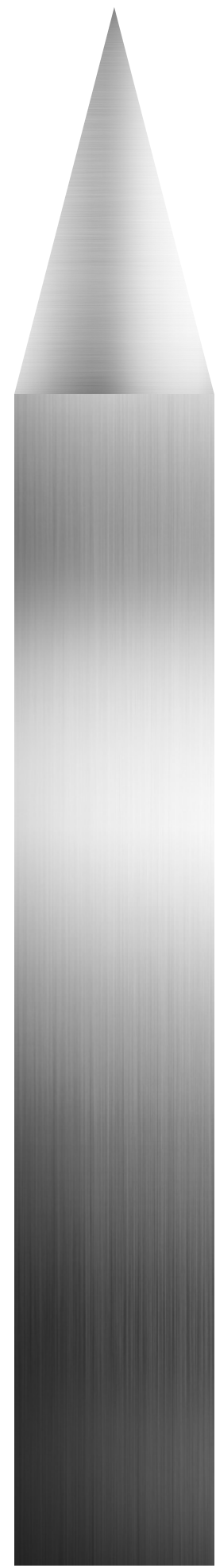



ANGULAR



DERMOMAG

MICROPIGMENTAÇÃO & MICROBLADING

QUANTIDADES

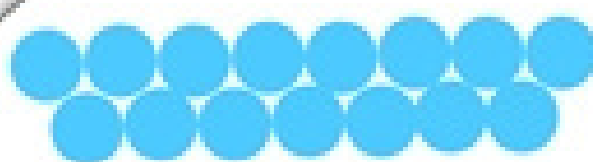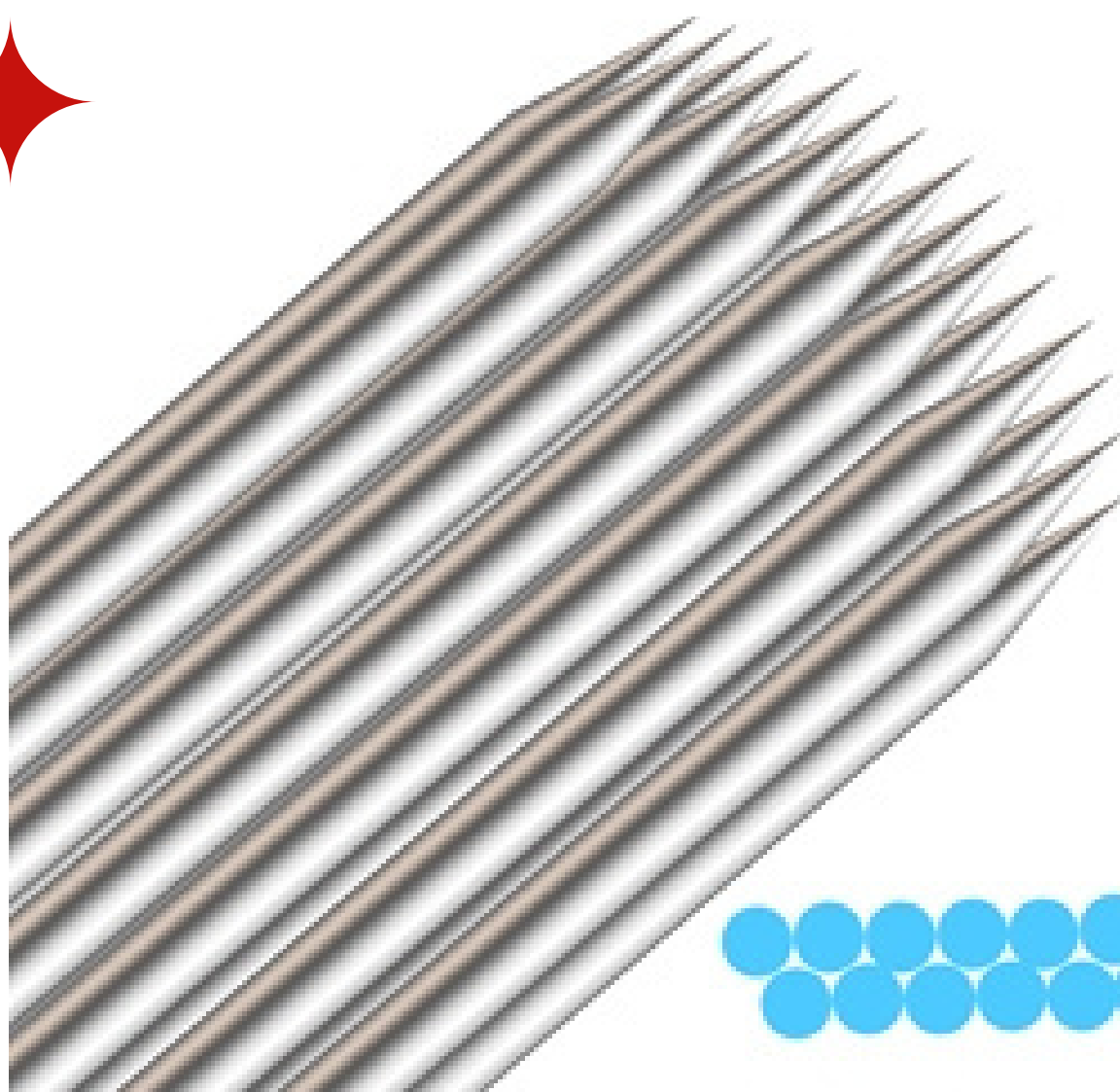

A quantidade de agulhas soldadas determina a área, a velocidade do preenchimento e a intensidade da aplicação do pigmento.

- **Mais Agulhas Soldadas** – Maior a área de Preenchimento; Força do Dermógrafo mais distribuída; Implantação suave.
- **Menos Agulhas Soldadas** – Menor área de Preenchimento; Implantação mais intensa; Força do Dermógrafo mais concentrada.

Convém lembrar, que a regulagem da intensidade do Dermógrafo também é um diferencial na obtenção do efeito visual desejado.



DERMOMAG
MICROPIGMENTAÇÃO & MICROBLADING

CONFIGURAÇÕES DE AGULHA

A configuração indica como as agulhas são agrupadas em conjunto na haste. Essa configuração, determina função básica da agulha.

- **Circular:** As pontas são unidas para terminarem em um único ponto. Usadas para traço e preenchimento de pequenas áreas.

- **Circular Fine:** As pontas são mais unidas que a circular, quase eliminando o espaço livre entre as pontas. Usada para traços extremamente finos e pontilhismo.

- ❖ **Brush:** Formação circular onde as pontas das agulhas ficam afastadas uma das outras. Usadas para traços largos ou preenchimento de pequenas áreas com maior intensidade.




CONFIGURAÇÕES DE AGULHA

A configuração indica como as agulhas são agrupadas em conjunto na haste. Essa configuração, determina função básica da agulha.



Linear: Formação de agulhas em uma única linha, onde todas as agulhas ficam paralelas entre si. Usadas para sombreamentos bastante suaves.

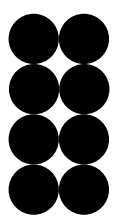

Magnum: Formação de agulhas onde duas fileiras lineares são sobrepostas uma à outra, criando uma configuração mais concentrada. Usada para um preenchimento de áreas maiores, como aréolas e peles. Necessita de uma potência maior do Dermógrafo para conseguir uma boa aplicação.

CLICK AQUI



Veja, na PRÁTICA, a diferença entre as configurações



DERMOMAG

MICROPIGMENTAÇÃO & MICROBLADING

AGULHAS DERMOMAG

- **1 PONTA FINE:** Espessura de 0,25mm – Longa – Para trabalhos delicados em peles sensíveis, fios finos, shadow, lábios e couro cabeludo.

- **1 PONTA XLT:** Espessura de 0,25mm - Corpo de 0,35mm – Extra Fina – Precisão para todos os tipos de pele, fio a fio, shadow, lábios e couro cabeludo.

- **1 PONTA:** Espessura de 0,35mm – Curta – Trabalhos de Micropigmentação em sobrancelhas, shadow, fio a fio, lábios e couro cabeludo.

- **3 PONTAS FINE:** Espessura de 0,25mm- Corpo de 0,35mm – Fina – Ideal para traços de olhos, contorno labial e couro cabeludo.


- **3 PONTAS CIRCULAR:** Espessura de 0,35mm – Curta – Trabalhos de pintura e preenchimento, como esfumados marcados e preenchimento de lábios.




DERMOMAG

MICROPIGMENTAÇÃO & MICROBLADING


AGULHAS DERMOMAG

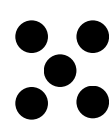


5 PONTAS FINE: Espessura de 0,25mm-
Corpo de 0,35mm – Fina – Ideal para
esfumados translúcidos em sobrancelhas,
olhos e lábios.

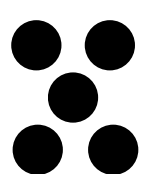

5 PONTAS CIRCULAR: Espessura de
0,35mm – Curta – Ideal para sombreados
mais suaves, em sobrancelhas, lábios e
reconstrução areolar.

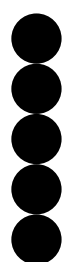

5 PONTAS LINEAR: Espessura de 0,35mm
– Angular – Ideal para camuflagens,
efeitos de iluminação na
micropigmentação e indução cutâneo.

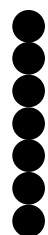

7 PONTAS FINE LINEAR: Espessura de
0,25mm – Angular – Ideal para
camuflagens transparentes em aréolas,
estrias, cicatrizes e pele.




7 PONTAS LINEAR: Espessura de 0,35mm
– Angular – Ideal para camuflagens
transparentes em aréolas, estrias,
cicatrizes e pele.




DERMOMAG

MICROPIGMENTAÇÃO & MICROBLADING

AGULHAS DERMOMAG

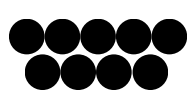

9 PONTAS MAGNUM: Espessura de 0,35mm – Angular – Ideal para transparência em aréolas, olheiras, estrias, cicatrizes e pele.

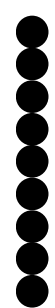

9 PONTAS FINE LINEAR: Espessura de 0,25mm – Angular – Ideal para camuflagens transparentes em aréolas, olheiras, estrias, cicatrizes e pele.



9 PONTAS LINEAR: Espessura de 0,35mm – Angular – Ideal para camuflagens transparentes em aréolas, olheiras, estrias, cicatrizes e pele.



Veja, na **PRÁTICA**, a diferença entre as configurações



DERMOMAG
MICROPIGMENTAÇÃO & MICROBLADING



DERMOMAG

MICROPIGMENTAÇÃO & MICROBLADING

AGU
LHAS

CLICK AQUI

